


Mepore®

Zelfklevend chirurgisch pleister

Mepore® is een ademend, zelfklevend chirurgisch pleisterverband dat uitermate geschikt is voor droge tot vochtige chirurgische wonden. Dankzij zijn huidvriendelijke, polyacrylaat kleeflaag op waterbasis staat Mepore® garant voor een veilige fixatie.

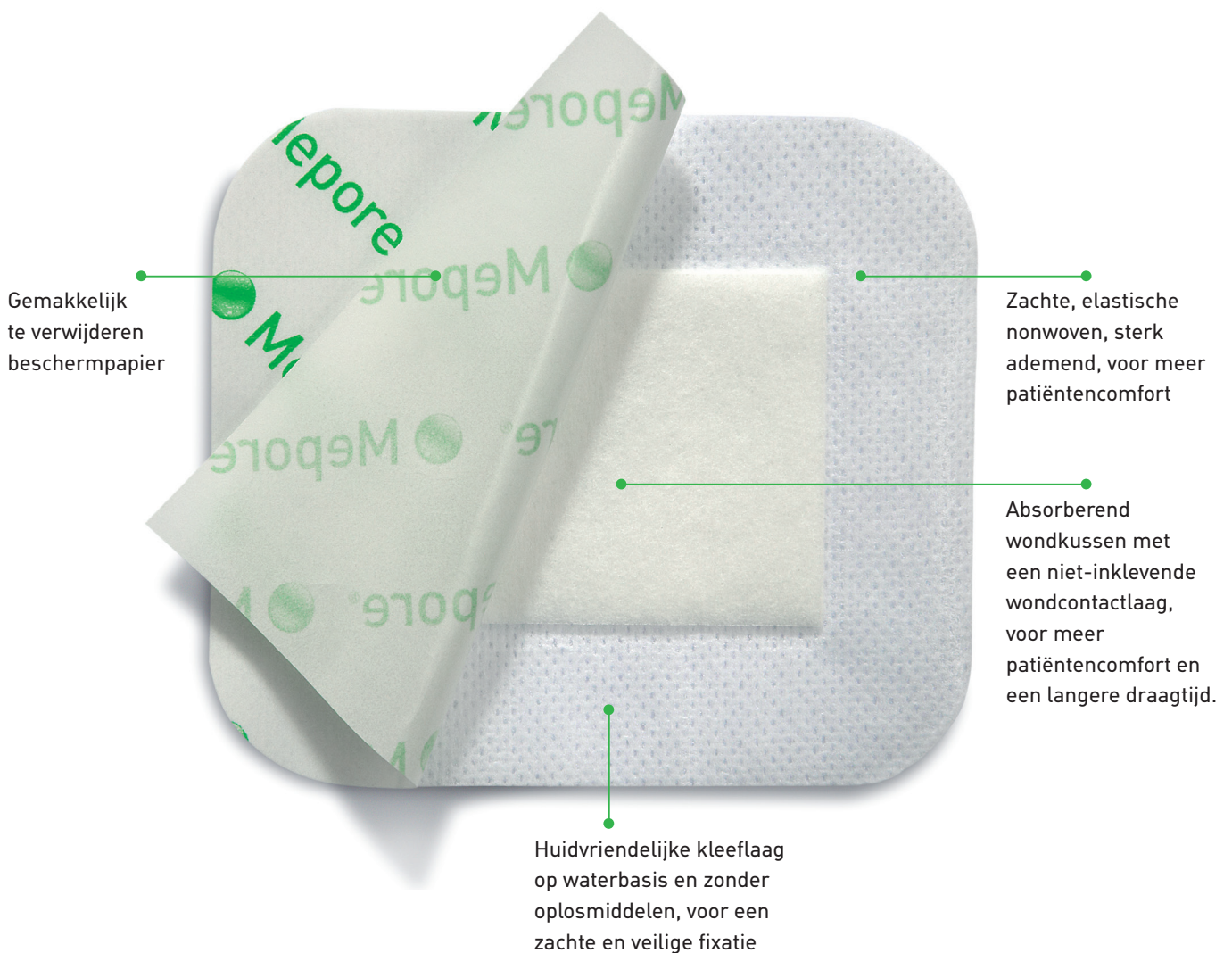

Gebruiksaanwijzing



Haal het verband uit de verpakking.



Verwijder het eerste van beide overlappende beschermepapieren, zodat de kleeflaag zichtbaar wordt en men het verband kan aanbrengen.



Plaats, in de anatomische houding, het verband op de huid zonder het uit te rekken. Verwijder zachtjes het overige deel van het beschermepapier. Strijk Mepore® glad zodat het verband goed kleeft.

Hoe werkt Mepore®?

De poreuze structuur van de nonwoven drager waarborgt de doorlaatbaarheid van lucht en water. Het materiaal is flexibel en vormt zich perfect naar de lichaamscontouren zodat men zich vrij kan bewegen. De drager is eveneens niet-absorberend en vormt een barrière tegen doorsijpelend bloed en wondvocht. De polyacrylaat kleeflaag op waterbasis garandeert een veilige fixatie en is tegelijk zacht voor de huid. Het wondkussen absorbeert wondvocht en de speciale wondcontactlaag vermindert het risico op verkleving aan de wond. Het gemakkelijk te verwijderen beschermepapier laat een steriel gebruik toe en vergemakkelijkt het aanbrengen van het verband.

Voordelen van Mepore®

- Huidvriendelijke kleeflaag op waterbasis
- Hypo-adherente wondcontactlaag vermindert het risico op verkleving in de wond
- Flexibele vochtwerende ruglaag
- Luchtdoorlatend, voorkomt maceratie en zorgt voor een beter comfort
- Gemakkelijk te verwijderen beschermepapier voor een veilig en steriel gebruik
- Afgeronde hoeken voor een veilige fixatie (dit voor alle maten kleiner dan 9x15 cm)



Toepassingen

- droge tot vochtige wonden
- chirurgische wonden
- snij- en schaafwonden

Hoe frequent vervangen?

Hoe vaak men het verband moet vervangen hangt af van de wondconditie. Om het verband te verwijderen dient men een hoek op te heffen en het verband zachtjes in de richting van de haargroei eraf te trekken.

Voorzorgsmaatregelen

Men moet er zorgvuldig op toezien dat Mepore® in de anatomische houding en zonder tractie wordt aangebracht om beschadigingen aan de huid te voorkomen. Zeker wanneer Mepore® wordt aangebracht op gewrichten (vb na heupoperaties) is dit een belangrijk aandachtspunt.

Assortiment Mepore® (steriel en niet-steriel)

Afmeting	CNK-code	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
6 x 7 cm	1599-646	670800	60 x 1 stuk	480 stuks
6 x 7 cm	0615-351	670870	10 x 1 stuk	140 stuks
9 x 10 cm	1599-653	670900	50 x 1 stuk	400 stuks
9 x 10 cm	0190-942	670970	5 x 1 stuk	100 stuks
9 x 15 cm	1599-661	671000	50 x 1 stuk	400 stuks
9 x 15 cm	0190-959	671070	5 x 1 stuk	70 stuks
9 x 20 cm	1599-679	671100	30 x 1 stuk	180 stuks
9 x 25 cm	1599-687	671200	30 x 1 stuk	180 stuks
9 x 30 cm	1599-810	671300	30 x 1 stuk	270 stuks
9 x 35 cm	1599-844	671400	30 x 1 stuk	180 stuks

Assortiment Mepore® op rol (niet-steriel)

2 m x 7 cm	0615-005	332080	1 stuk	21 stuks
------------	----------	--------	--------	----------