



# Mextra® Superabsorbent

## SUPERABSORBEREND WONDVERBAND MET EEN VLOEISTOFADFWERENDE TOPLAAG


- Optimaal exsudaatmanagement
- Biedt meer patiëntencomfort
- Geschikt voor gebruik onder drukverbanden

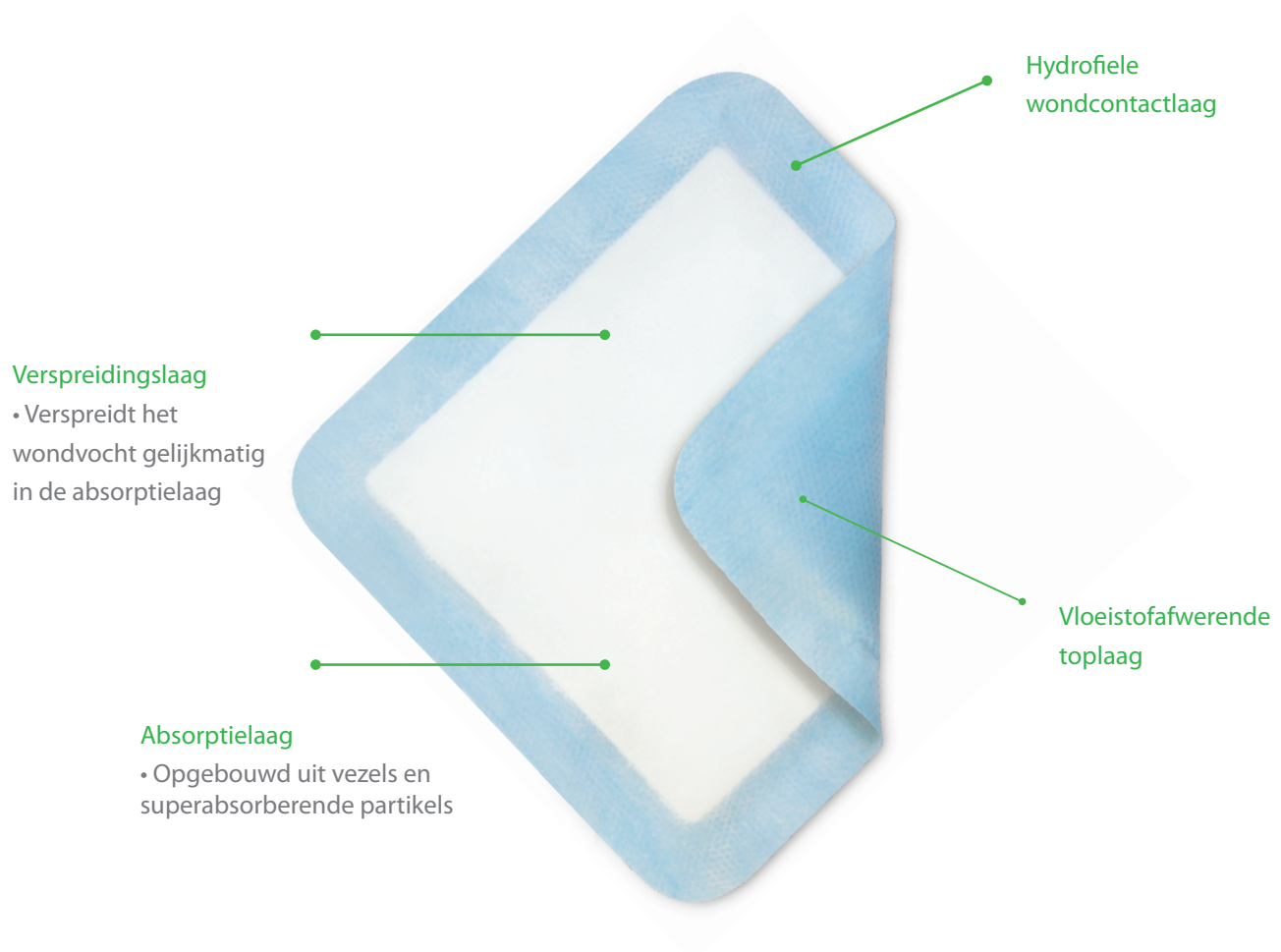


## Gebruiksaanwijzing

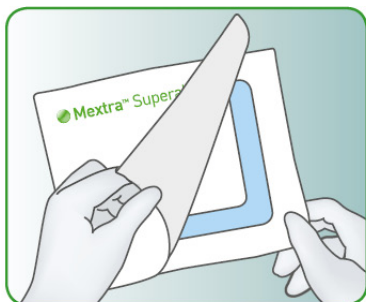

Reinig het wondgebied en kies een geschikte afmeting van Mextra® Superabsorbent.

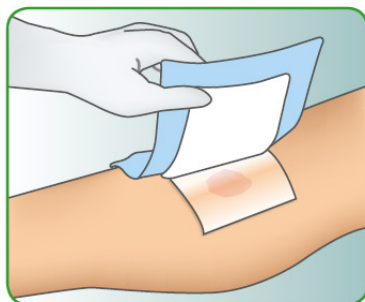

Breng Mextra® Superabsorbent rechtstreeks aan op het wondgebied met de witte zijde van het verband op de wond. Voor het beste resultaat moet het wondkussen de droge omliggende huid met minstens 2 cm overlappen. Mepitel® of Mepitel® One kunnen ook gebruikt worden in combinatie met Mextra® Superabsorbent.

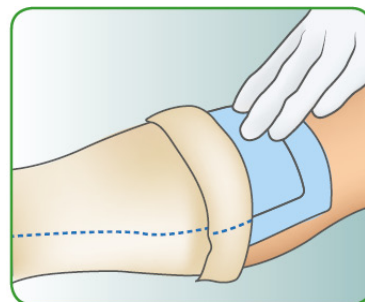

Fixeer Mextra® Superabsorbent met een geschikt verband zoals Tubifast® 2 Way Stretch® buisverband of een fixatietape. Mextra® Superabsorbent kan gebruikt worden tijdens compressietherapie.

## Hoe Mesorb werkt

Mextra® Superabsorbent absorbeert wondvocht door de wondcontactlaag, houdt dit vast in de kern waardoor het risico op maceratie wordt geminimaliseerd. De vloeistofafwerende nonwoven ruglaag werkt als een wondvochtbarrière en voorkomt doorlekken van wondvocht.

## Voordelen

- Uitstekende absorptie en retentie
- Minimaliseert het risico op maceratie en doorlekken
- Behoudt integriteit en is niet volumineus na absorptie van wondvocht
- Beschermt tegen doorlekken van wondvocht
- Buitenste laag blijft droog
- Heeft protease modulerende eigenschappen\* en zorgt voor een bevorderlijke omgeving voor wondgenezing

\* De superabsorberende partikels in de absorptielaag hebben een protease modulerende werking

## Indicaties

- Matig tot zeer natte wonden

## Frequentie van verbandwissels

Mextra® Superabsorbent kan gedurende meerdere dagen ter plaatse blijven. Het verband moet vervangen worden volgens de klinische conditie van de wonde, of wanneer het verzadigd is.

## Mextra Superabsorbent assortiment

Art. nr	Afm. (cm)	CNK-code	Stuks/RET	Stuks/TRP
610000	10x10	2998-797	10	50
610100	10x15	3000-239	10	40
610200	10x20	2998-805	10	90
610300	15x20	3000-247	10	40
610400	20x25	2998-813	10	40
610500	20x30	2998-821	10	50

Meer informatie op [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72/2, 2600 Berchem, België. Tel +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52  
Mölnlycke Health Care en Mextra® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care.

© 2013 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.

  
**Mölnlycke®**