

Een zelfzorggids voor verbandwissels


Uw verpleegkundige koos Mextra® Superabsorbent voor uw wond

Hoe brengt u Mextra® Superabsorbent aan?

1. Was uw handen 20 seconden met zeep en warm water.
2. Reinig de wond volgens het advies van uw verpleegkundige.
3. Breng Mextra Superabsorbent rechtstreeks aan op het wondgebied met de witte zijde van het verband op de wond. Blauwe zijde naar boven!



4. Het wondkussen moet de droge omliggende huid overlappen.
5. Fixeer het Mextra Superabsorbent verband bijvoorbeeld met een geschikte zwachtel of tape die u van uw verpleegkundige heeft gekregen.

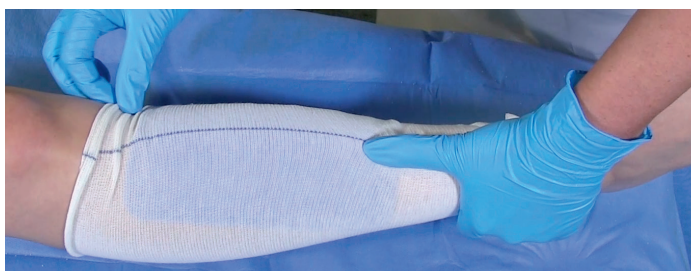

Wanneer moet u uw verband verwisselen?

Uw verpleegkundige raadt aan om het verband te verwisselen:

Neem voor verdere hulp en advies contact op met uw verpleegkundige:

Waarop moet u letten?

- Knip niet in het Mextra Superabsorbent verband
- Mextra is voor eenmalig gebruik en mag dus niet opnieuw gebruikt worden.

Als u toegang tot internet heeft, kan u het filmpje over het aanbrengen van uw verband bekijken via de volgende link (of scan de code met uw telefoon):



www.molnlycke.com/mextra-application

Mextra Superabsorbent verband moet door professionele zorgverleners worden gebruikt en aangebracht. Indien echter geen professionele zorgverlener beschikbaar is, zal misschien een gezinslid of uzelf de verbandwissel moeten doen. Mölnlycke Health Care draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het aanbrengen van het verband door deze personen. Als Mextra Superabsorbent dus wordt aangebracht door iemand die geen professionele zorgverlener is, neemt de gebruiker alle risico's op zich.

Meer informatie op www.molnlycke.be of www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, 2600 Berchem (Antwerpen), België. Tel. +32 (0)3 286 89 50.

Mölnlycke Health Care B.V., Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel. +31 (0)176 521 96 63.

De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke en Mextra zijn wereldwijd geregistreerd door een of meer bedrijven van de Mölnlycke Health Care Group.

©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. BNWC00082007 - NLWC00082007