

BARRIER® Bariatrische laparoscopieset



- De ruime afmetingen van het laken en de opening zijn specifiek afgestemd op de eisen van de bariatrische chirurgie
- Geavanceerde kleefstrook voor verhoogde infectiebeheersing en drapeerbaarheid
- De chirurg kan kiezen tussen twee ontwerpen om flexibel te werken: voor rug- en lithotomieligging
- Geïntegreerde slangenhouders voor optimaal beheer van kabels en slangen
- Driedimensionaal afdek- en vouwontwerp voor steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door één persoon

Afdekinstructie



1. Verwijder het release papier. Plaats het laken in het midden van de patiënt (zie pictogram).



2. Vouw het laken open naar de zijkanten, eerst naar u toe.



3. Vouw het laken open naar de benen van de patiënt.



4. Zie voetpictogram voor lithotomieligging. Neem de hoeken vast en vouw het laken open boven de beensteunen, doe hetzelfde aan weerszijden.



5. Vouw het bovenste gedeelte van het laken open over de anesthesieboog.



6. U bent klaar met afdekken. Gebruik de slangenhouders om slangen en kabels te bevestigen.

Ref. nr.	Bariatrische laparoscopieset	Disp/Trp
61450	Bariatrische laparoscopieset	5/10
	1 mayo overzettafelsloop 79×145cm 4 handdoekjes 19×25cm 1 OP-tape 9×49cm 2 slangenhouders 2.5×30cm 1 camerahoes 12×240cm 2 instrumentenzakken 25×40cm 1 laparoscopielaken 280/230/270×330cm, opening 32×42cm met beenovertrekken 1 instrumentenveld 150×190cm	

Ref. nr.	Component Mölnlycke® procedure trays
70550	Laparoscopielaken 280/230/270×330cm, opening 32×42cm met beenovertrekken
70551	Laparoscopielaken 280/230/200×430cm, opening 30×40cm zonder beenovertrekken
975880	Instrumentenzak 25×40cm

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
 Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
 De Mölnlycke en BARRIER naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
 © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSUxxxx1709)

