



# Mölnlycke®

## Sectiolaken BARRIER®

- Driedimensionaal ontwerp zorgt voor een betere manier van afdekken
- Geïntegreerde vloeistofopvangzak voor efficiënte vloeistofcontrole
- Zacht schuimrubber aan de randen van de opvangzak voor stabiliteit en een optimaal vloeistofbeheer
- Geïntegreerde transparante incisiefolie voor een veilige fixatie
- Geïntegreerde slanghouders




### **BARRIER creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer patiënten door efficiëntere zorg**

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Onze innovatieve en procedure-specifieke oplossingen worden aangevuld door voordelen op het gebied van levering, permanente ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, inspanning en kosten zodat u meer patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg.

## Instructies



1 Let op de richting van het pictogram. Verwijder het release papier.

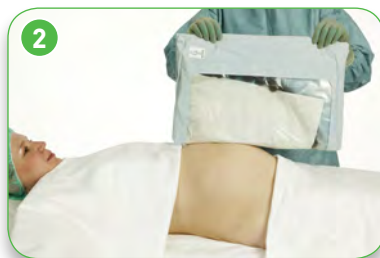

2 Leg het laken in het midden van de patiënt.



3 Vouw het laken eerst naar jezelf open en vervolgens naar de andere kant.



4 Vouw het laken open in de richting van de voeten van de patiënt en vervolgens over de anesthesieboog.



5 Vouw de opvangzak open.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
65031	<b>Sectiolaken</b> 175/250x300 cm, incisiefolie 38x32 cm, ingepakt	6/12
694110	<b>Sectioset</b> 4 handdoekjes 19x25 cm 1 OP-tape 9x49 cm 1 babylaken 90x120 cm 1 sectiolaken 175/250x300 cm, incisiefolie 38x32 cm 1 instrumentenveld 150x190 cm, 75x190 cm absorberend	5/10

Alle vermelde componenten zijn ook beschikbaar voor ProcedurePak® trays.

## BARRIER afdek materiaal

- 100% ondoordringbaar voor optimale veiligheid van de patiënt
- Optimaal gevouwen voor een steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door 1 persoon
- Gebruiksvriendelijk verpakt met handvaten aan de dispenserdoos voor een efficiënte hantering