

BARRIER® Beach chair schouderlaken



- Geïntegreerde vloeistofopvangzak voor efficiënte vloeistofcontrole
- Ruim all-in-one laken voor schouderchirurgie voor een patiënt in zittende houding
- Optimale vouwwijze voor een steriele afdekking
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid



1. Leg eerst het splitlaken op de patiënt.



2. Breng de split zo breed mogelijk rond de schouder van de patiënt aan.



3. Breng de stockinette aan.



4. Vouw het laken één maal open, neem de hand van de patiënt en trek ze door de opening.



5. Verwijder de beschermfolies en plaats de opening zo hoog mogelijk op de schouder. Vouw het laken open.



6. Vouw het laken open naar de voeten van de patiënt en dan over het hoofd van de patiënt naar het anesthesieframe.



7. Stel eventueel de vloeistofopvangzak bij. Het afvoerkanaal kan indien nodig worden aangesloten op een afzuigslang

Ref. nr.	Steriele codes	Afmetingen	Absorberend oppervlak	Disp/Trp
60003	Beach chair schouderzet: 1 x versterkte Mayo overzettafelloop 4 x cellulose doeken 1 x splitlaken (plastic), split 15 x 61cm 1 x stockinette 2 x OP-tapes 1 x beach chair schouderlaken, opening 10 x 10cm elastisch 1 x versterkt instrumentenveld	79 x 145cm 18 x 25cm 150 x 193cm 22 x 75cm 9 x 49cm 400 x 240cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm	4 / 8
60004	Beach chair schouderlaken, opening 10 x 10cm elastisch	400 x 240cm		6 / 12

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.

Ref. nr.	Component Mölnlycke® procedure trays	Afmetingen
70004	Beach chair schouderlaken, opening 10 x 10cm elastisch	400 x 240cm

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
De Mölnlycke en BARRIER naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00811709)

Mölnlycke®