

BARRIER® Extremitätenlaken met Drisite® Plus



- Drisite® Plus* biedt een uitstekende absorptie en vochtafvoer
- Versterkte materialen in de kritieke zone zorgen voor een betrouwbare kwaliteit met een hoge scheurweerstand
- Optimale vouwwijze voor een steriele afdekking en drapeerbaarheid door één persoon
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid

* Drisite® Plus is een gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones, samengesteld uit een droge, sterke en absorberende barrière.

Afdekinstructie



1. Vouw het instrumentenveld open en leg het onder het been van de patiënt.



2. Alternatief 1: Bedek het onderbeen met de zelfklevende doek en zet vast met OP-tape.




2. Alternatief 2: Bedek het been met de kleine stockinette.



3. Zet vast met OP-tape.



4. Leg het uitgevouwen extremitetenlaken over de voet van de patiënt, zodat de pijl in de richting van het lichaam van de patiënt wijst.

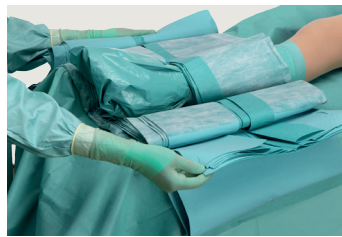

5. Vouw één kant van het extremitetenlaken open en geef dit aan een assistent. Til het been van de patiënt op en trek het extremitetenlaken tot over de knie van de patiënt. Vouw de zijkanten van het laken open.



6. Pak de voet van de patiënt door de elastische opening vast en trek het laken omlaag over de voet.



7. Vouw de bovenkant van het laken open over de anesthesieboog.

Ref. nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60202	Extremitetenset 1 OP-tape 9x49cm 1 extremitetenlaken 230x315cm, opening 7cm elastisch 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	7/14
60205	Extremitetenset 4 cellulose doeken 18x25cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 2 OP-tapes 9x49cm 1 extremitetenlaken 230x315cm, opening 7cm elastisch 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 inpakveld 100x100cm	6/12

Ref. nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60208	Extremitenset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 zelfklevend afdeklaken 75x75cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 extremitenlaken 230x315cm, opening 7cm elastisch 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	5/10
60205	Extremitenset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 stockinette 22x75cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 extremitenlaken 230x315cm, opening 7cm elastisch 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	5/10
60211	Extremitenlaken 200x300cm, opening 7cm elastisch	11/22
60212	Extremitenlaken 230x315cm, opening 7cm elastisch, ingepakt	10/20
60213	Extremitenlaken 230x315cm, opening 7cm elastisch	10/20

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.

Ref. nr.	Component Mölnlycke® procedure trays
70210	Extremitenlaken 250x315cm, opening 7cm elastisch
70211	Extremitenlaken 200x300cm, opening 7cm elastisch
70213	Extremitenlaken 230x315cm, opening 7cm elastisch

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
De Mölnlycke en BARRIER naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00831709)

