


BARRIER® Extremitätenlaken met Drisite® Plus



- Drisite® Plus* biedt een uitstekende absorptie en vochtafvoer
- Versterkte materialen in de kritieke zone zorgen voor betrouwbare kwaliteit met een hoge scheurweerstand
- Driedimensionaal model om een groot gebied te beschermen voor anesthesie
- Geïntegreerde slangenhouders om het instrumenteren te vergemakkelijken
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid

* Drisite® Plus is een gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones, samengesteld uit een droge, sterke en absorberende barrière.

Afdekinstructie

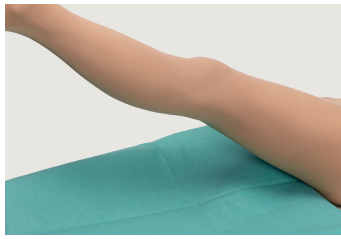

1. Vouw het instrumentenveld open en leg deze onder het been van de patiënt.



2. Alternatief 1: bedek het been met de zelfklevende doek en zet vast met OP-tape.



2. Alternatief 2: bedek het been met de stockinette.



3. Zet vast met een OP-tape.



4. Leg het uitgevouwen extremitetenlaken over de voet van de patiënt, zodat de pijl in de richting van het lichaam van de patiënt wijst.



5. Vouw één kant van het extremitetenlaken open en geef deze aan een assistent. Til het been van de patiënt op en trek het extremitetenlaken tot over de knie van de patiënt. Vouw de zijkanten van het laken open.



6. Til de voet van de patiënt omhoog en trek het laken naar beneden.



7. Vouw de bovenkant van het laken open over de anesthesieboog.

Ref. nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60206	Extremitetenset 1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 1 zelfklevende afdekdoek 75x75cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 extremitetenlaken 200/300x320cm, opening 7cm elastisch 1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	7/14
60214	Extremitetenlaken 200/300x320cm, opening 7cm elastisch, opgevouwen	7/14

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays

Ref. nr.	Componenten Mölnlycke® procedure trays
70214	Extremitetenlaken 200/300x320cm, opening 7cm elastisch

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
De Mölnlycke en BARRIER naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00821709)

