

## BARRIER® Heuplaken met Drisite® Plus

- 3D-design om optimaal af te dekken bij heupchirurgie
- Drisite Plus voor een optimale vloeistofcontrole bij ingrepen met veel vocht
- Ultrasterk materiaal in kritieke zones
- Volledig ondoordringbare materialen om doorlekken bij verschillende chirurgische ingrepen te voorkomen
- Geïntegreerde sterke slangenhouders





1 Ontvouw het instrumentenveld en leg deze onder het been van de patiënt.



2 Alt. 1: Leg een zelfklevende doek met kleeftand richting het hoofd en verwijder de plakstrip. Leg een tweede zelfklevende doek over de eerste doek met de kleeftand van de patiënt af.



3 Vouw één kant rond het been. Vouw de tweede doek over de voet en zet de kleeftand vast op het been.



4 Zet de doeken rond de voet en langs het been vast met een OP-tape.



5 Alt. 2: bedek het been met een stockinette en zet deze vast met OP-tape.



6 Steek het been door de opening. Een plakstrip onder het afdek materiaal zorgt voor extra veiligheid.



7 Trek het heuplaken richting het hoofd van de patiënt en zet de elastische opening vast in de juiste positie.



8 Plaats het heuplaken over de anesthesieboog.

	Steriele code
60600	Heuplaken 230/300×330 cm, opening 18×22 cm elastisch, opgevouwen
	Onderdelen ProcedurePak®
70600	BNS Heuplaken 230/300×330 cm, opening 18×22 cm elastisch, opgevouwen