

## BARRIER® instrumentenveld


- Sterke en duurzame materialen
- Ondoordringbaarheid en doeltreffende absorptie voorkomen doorslag en contaminatie
- Zelfklevende etiketten\* voor een snelle, gemakkelijke en veilige fixatie
- Nauwkeurig gevouwen en verpakt voor eenvoudig en doeltreffend gebruik
- Ruime keuze van maten biedt oplossingen voor alle tafels



### BARRIER creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer patiënten door efficiëntere zorg

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Het assortiment van innovatieve, doelgerichte oplossingen biedt kwaliteitsproducten die de veiligheid verhogen, voordelen op het gebied van levering en logistiek, en permanente ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, inspanning en kosten. Hierdoor komen waardevolle middelen vrij en kan efficiënter worden gewerkt, zodat u meer patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg.



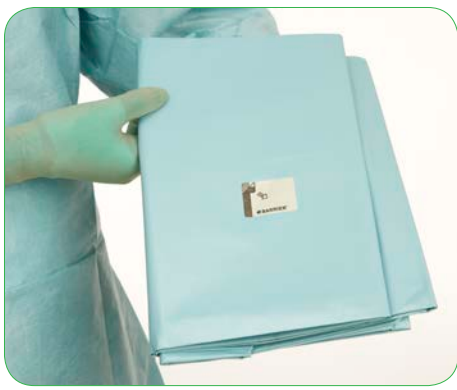

1 Hou het instrumentenveld in de richting die is aangegeven door het pictogram. Het zelfklevend etiket kan het laken aan de tafel bevestigen.



2 Verwijder de beschermstrook van het etiket.




3 Leg het instrumentenveld op de instrumententafel.



4 Vouw het open naar de zijkanten.



5 Vouw het instrumentenveld open in uw richting.

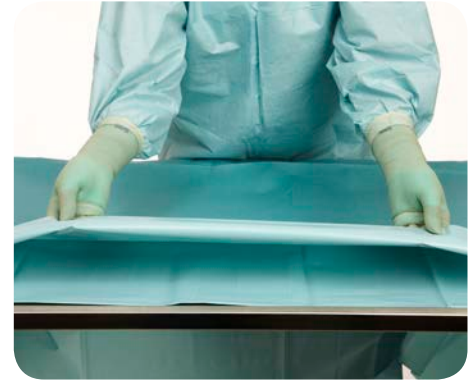

6 Vouw het open in de tegengestelde richting.

Artikelnummer	ProcedurePak <sup>®</sup> componenten	Maat	Absorptiezone	Verpakking
80100	90100	100×150cm	75×150cm	40/80
80150	90150	150×150cm	75×150cm	30/60
80170	90170	150×170cm	75×170cm	27/54
80190	90190	150×190cm	75×190cm	22/44
80210	90210	150×210cm	75×210cm	21/42
80240	90240	150×240cm	75×240cm	20/40

\* Alleen bij steriele, per stuk verpakte of volledig gevouwen instrumentenvelden in sets of trays.