


Melgisorb® Plus

Absorberend alginaatverband

Melgisorb Plus is een sterk absorberend verband voor een brede waaier aan matig tot sterk exsuderende wonden. Het zachte en steriele verband is opgebouwd uit natrium calcium alginaatvezels die zorgen voor:


- Uitstekende absorptiecapaciteit - absorbeert grote hoeveelheden wondexsudaat
- Hoge natsterkte - zorgt ervoor dat het verband in één geheel verwijderd kan worden dankzij de sterkte van de alginaatvezels
- Hoge retentie - minimaliseert kans op maceratie

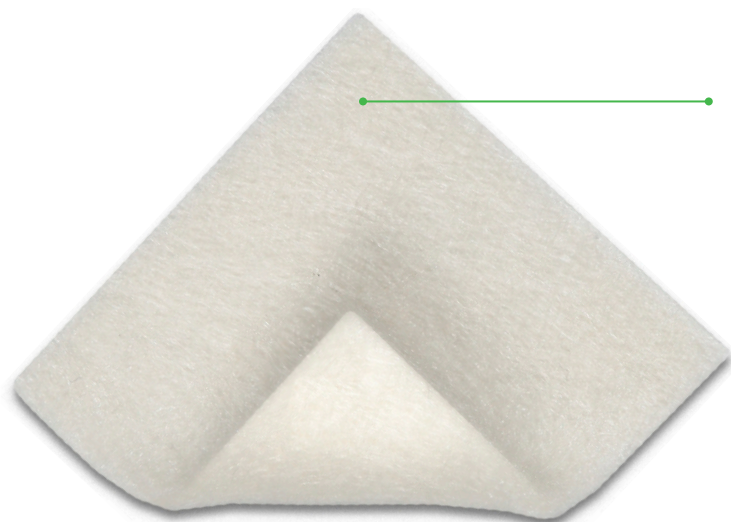


Hydrofiele alginaatvezels

- Behouden een vochtig wondmilieu
- Verminderen de kans op maceratie
- Vermijden verkleving in de wond

Gebruiksaanwijzing

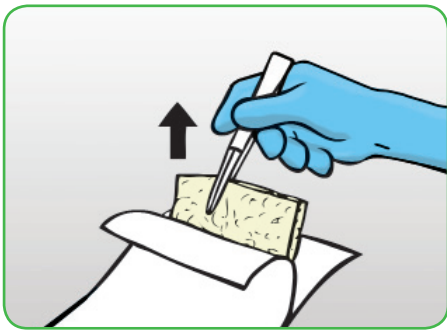


1. Kies een afmeting van Melgisorb Plus die iets groter is dan de wond. Trek de verpakking open.

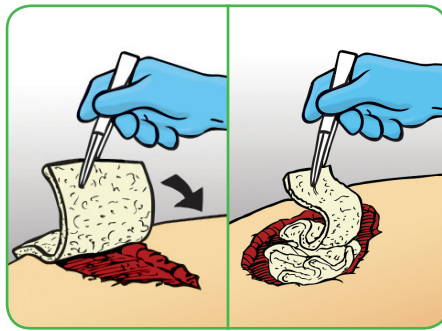

2. Breng een droge Melgisorb Plus aan op het vochtige wondbed.

Ondiepe wonden: Kies een juiste afmeting van Melgisorb Plus om de volledige wond te kunnen bedekken.

Diepe wonden en holtes: Knip de streng op de juiste maat en plaats deze losjes in de wond.

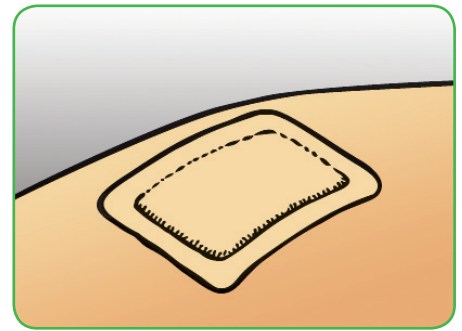

3. Bedek en bevestig Melgisorb Plus met een geschikt secundair verband zoals Mepilex® Border.

Compressietherapie kan gebruikt worden in combinatie met Melgisorb Plus.

Hoe Melgisorb Plus werkt

Melgisorb Plus absorbeert hoge hoeveelheden wondexsudaat. Bij het absorberen vormen de alginaatvezels een zachte, vochtige gel die zorgt voor een vochtig wondmilieu. Hierdoor zal het wondgenezingsproces bevorderd worden. De gel kan gemakkelijk verwijderd worden door uit te spoelen met 0,9% zoutoplossing.

Voordelen van Melgisorb Plus

- Zeer absorberend
- Kleeft niet aan de wondsite bij gelvorming
- Geschikt voor wondholtes
- Gelvorming bij contact met exsudaat of ionen met natrium (zoutoplossing)
- Zacht/plooibaar
- Kan geknipt worden
- Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Niet sensibiliserend

Indicaties

Melgisorb Plus is geschikt voor een brede waaier aan matig tot sterk exsuderende wonden, zowel geïnfecteerde als niet-geïnfecteerde wonden zoals:

- Doorligwonden
- Veneuze en arteriële ulcera
- Diabetische ulcera
- Donor sites
- Postoperatieve wonden
- Huidletsels en andere externe wonden veroorzaakt door trauma

Afmetingen beschikbaar voor zowel diepe als ondiepe wonden

Contra-indicaties

Melgisorb Plus is niet geschikt voor droge wonden, derdegraads brandwonden of chirurgische implantaties.

Voorzorgsmaatregelen

In geval van tekenen van infectie, volg de lokale richtlijnen gegeven door de zorgverleners.

Niet hergebruiken: dit kan leiden tot verminderde prestatie van het product of tot kruisbesmetting.

Melgisorb Plus (assortiment)

Art. nr.	Afm. (cm)	Z-indexnr.	Stuks/RET	Stuks/TRP
252000	5x5	15928888	10	100
252200	10x10	15929183	10	100
252500	10x20	15929191	10	100
253500	3x45 (streng)	15929205	5	50



Meer informatie op www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD Breda, Nederland. Tel +31 (0)76 521 96 63 - Fax +31 (0)76 522 17 82
Mölnlycke Health Care, Melgisorb® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care.
Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.